

Manual de aplicação **MYCLIC**[®]

Um guia passo a passo para a utilização
da caneta preenchida de ENBREL[®] 50 mg



Este guia tem por objetivo auxiliá-lo no passo a passo para aplicação do ENBREL® com a caneta preenchida MYCLIC®¹.

As informações a seguir foram fornecidas para ajudá-lo no uso da caneta MYCLIC® para aplicar ENBREL®.

Estas informações abrangem:

1. Preparação para aplicar ENBREL®
2. Escolha um local para aplicação
3. Aplicação ENBREL®
4. Descarte a caneta MYCLIC® usada

Certifique-se de ter lido todas as instruções antes de começar.

Após a leitura deste guia, caso você ainda apresente quaisquer dúvidas sobre a preparação e injeção de ENBREL®, você pode obter o auxílio de um profissional treinado e orientado através do **Programa Muito Bem-Vindo**, ligando para o telefone **0800 726 7272***, ou ainda através do Fale Pfizer, pelo telefone **0800 770 1575**.

*Apenas para pacientes cadastrados no programa MBV.

Questões importantes a serem lembradas antes de começar¹

Aqui estão algumas dicas para deixá-lo preparado e ajudá-lo no manuseio de Enbrel® em seu dia-a-dia:

- Armazene as canetas MYCLIC® em uma geladeira (entre 2 °C e 8 °C). Nunca utilize o congelador.
- Pode ser de grande ajuda seguir uma programação rotineira quanto aos dias e horários de injeção a cada semana.
- Mantenha as canetas MYCLIC® fora do alcance e do campo de visão de crianças.
- Sempre descarte as canetas MYCLIC® conforme as orientações do seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.
- Nunca reutilize as canetas MYCLIC® ou outros materiais relacionados à injeção.
- Verifique a data de validade na embalagem e na caneta MYCLIC®. Se a data de validade estiver vencida, não use a caneta preenchida e entre em contato com o seu médico/farmacêutico para orientações.

Antes de aplicar Enbrel®

Consulte a bula na embalagem de MYCLIC® quanto a informações importantes que deverão ser lidas antes do uso de ENBREL® – incluindo informações sobre possíveis reações alérgicas, efeitos colaterais (sérios ou outros) e sob quais circunstâncias ENBREL® não deve ser utilizado.

Como utilizar a MYCLIC®¹

As instruções a seguir explicam como utilizar a caneta MYCLIC® para aplicar ENBREL® (etanercepte). Leia cuidadosamente as instruções e siga-as passo a passo.

Não tente administrar uma injeção até que você esteja certo de que compreende como utilizar a caneta MYCLIC® de modo adequado.

Caso você tenha dúvidas sobre como aplicar a injeção, peça ajuda ao seu médico ou enfermeiro.

Esta injeção não deve ser misturada a nenhum outro medicamento.

PASSO 1

Preparação para aplicar Enbrel® MyClic.^{1,2}

- Selecione uma superfície de trabalho limpa, plana e bem iluminada.
- Reúna os itens necessários para a injeção e posicione-os sobre a superfície escolhida:
 - a) Uma caneta MYCLIC® e um lenço umedecido com álcool (retire-os da embalagem de canetas que você mantém na geladeira).
 - b) Uma bola de algodão ou gaze.



- Não se esqueça de verificar a data de validade da caneta MYCLIC®. Inspeção a solução contida na caneta através da janela de inspeção transparente. Injete a solução apenas caso esteja límpida a opalescente, incolor a amarelada ou acastanhada, e pode conter pequenas partículas de proteína brancas ou quase transparentes. Se você estiver preocupado com a aparência da solução, utilize outra caneta e, em seguida, entre em contato com seu médico/farmacêutico ou Fale Pfizer (telefone **0800 770 1575**) para obter ajuda.
- Não retire a tampa branca da agulha e aguarde de 15 a 30 minutos de modo a permitir que a solução de ENBREL® atinja a temperatura ambiente. Não aquecer de qualquer outra forma. **Sempre a mantenha fora do alcance e do campo de visão de crianças.**
- Enquanto aguarda que a solução na caneta atinja a temperatura ambiente, leia o Passo 2 (a seguir) e escolha um local para injeção.


Deixar que a caneta atinja a temperatura ambiente pode ajudar a reduzir possíveis desconfortos ao aplicar a injeção.^{1,2}

PASSO 2

Escolha um local para aplicação^{1,2}

- O local recomendado para injeção são as partes centrais anteriores (da frente) da coxa (vide figura 2). Se preferir poderá, como alternativa, utilizar a região da barriga, mas certifique-se de escolher um local a pelo menos 5 cm de distância do umbigo. Caso outra pessoa for aplicar a injeção, a área externa na parte superior dos braços também pode ser utilizada.
- Cada nova injeção deve ser administrada a pelo menos 3 cm de distância do local da última aplicação. Não injetar em áreas onde a pele estiver sensível, com ferimentos ou dura. Evite cicatrizes ou estrias. Pode ser útil anotar os locais das aplicações anteriores.
- Caso tenha psoríase, você não deve administrar diretamente nas áreas em que a pele esteja elevada, espessa, avermelhada ou descamando.

Figura 2.

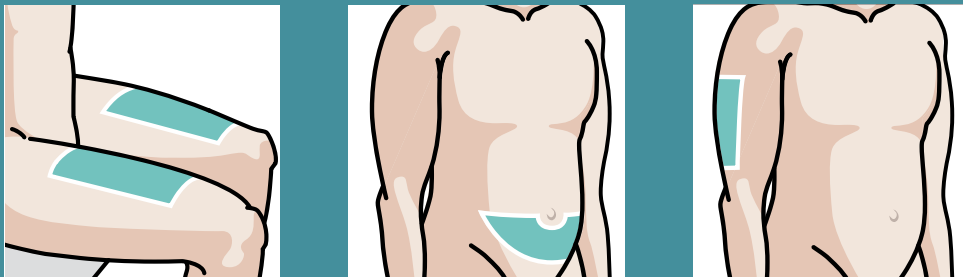


Se preferir, anote qual foi o local da aplicação e a data, ao anotar você se lembrará dos locais de injeção anteriores.

Caso esteja cadastrado no programa Muito-bem Vindo, você pode utilizar o boneco imantado que serve como um lembrete para sua próxima aplicação.

PASSO 3

Aplicação Enbrel® MyClic.^{1,2}



- Após aguardar de 15 a 30 minutos para que a solução na caneta atinja a temperatura ambiente, lave suas mãos com sabão e água.
- Limpe o local de injeção com o lenço umedecido com álcool, fazendo movimentos circulares, e deixe secar. Não encoste nesta área novamente antes da aplicação.
- Quando a pele estiver seca, pegue a caneta MYCLIC® e retire a tampa branca da agulha puxando-a firmemente (vide figura 3). Para evitar danos à agulha dentro da caneta, não dobre a tampa branca da agulha ao removê-la e não a coloque novamente na caneta uma vez removida. Após ter removido a tampa branca da agulha, você verá a proteção de segurança roxa na extremidade da caneta.

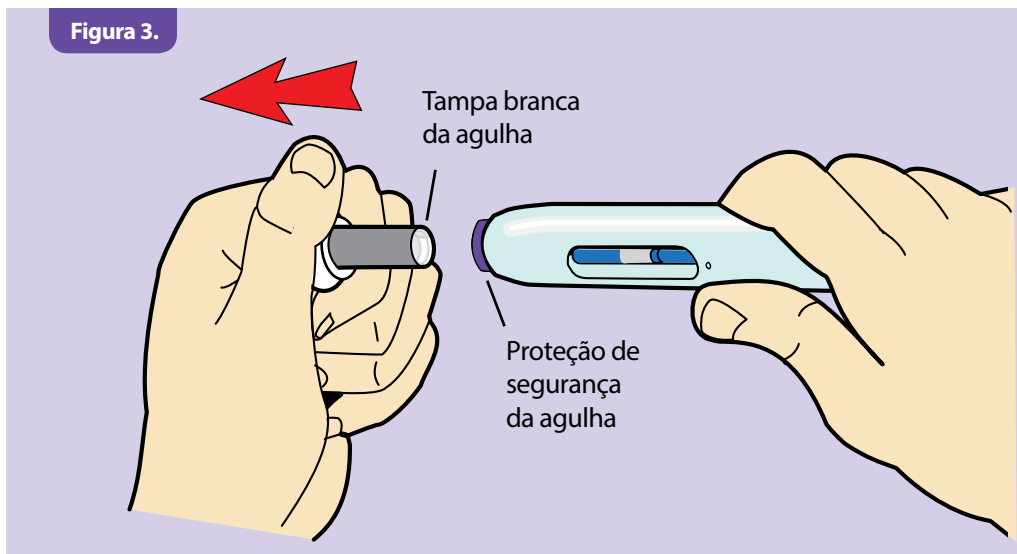



- Sem pressionar o botão verde no topo da caneta MYCLIC®, segure-a sobre o local de injeção em um ângulo reto (90°) e pressione a extremidade da proteção de segurança sobre a pele até que a proteção de segurança deixe de ser vista. Você observará uma ligeira depressão na pele (vide figura 4).

NUNCA pressione o botão verde antes que a caneta esteja firmemente pressionada contra a pele, pois isto pode impedir que a caneta MYCLIC® funcione do modo adequado.

- Enquanto estiver segurando firmemente a caneta no local, pressione e solte imediatamente o botão verde no topo da caneta utilizando o polegar para iniciar a injeção (vide figura 5). Ao pressionar o botão, você ouvirá um clique. Este clique indica o início da injeção. Continue pressionando firmemente a caneta contra a pele até ouvir um segundo clique ou por 10 segundos após o primeiro clique (o que ocorrer primeiro).

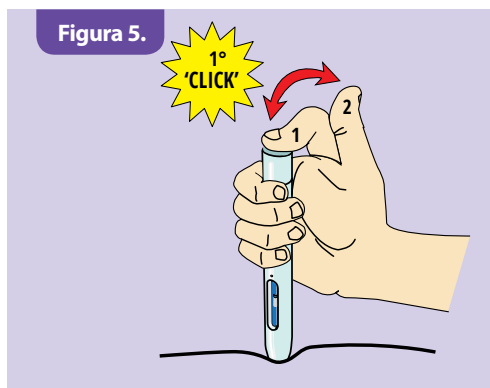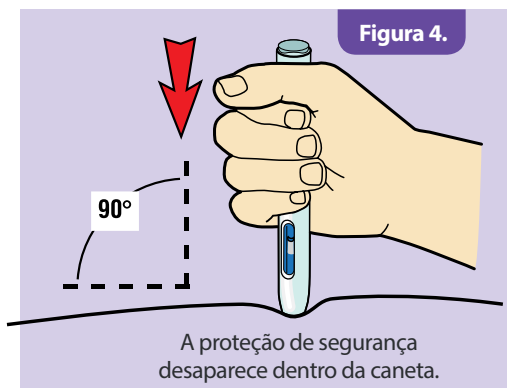

- Ao ouvir o segundo clique (ou, caso não ouça o segundo clique, após decorridos 10 segundos), sua injeção terá sido aplicada por completo (vide figura 6). Agora, você poderá retirar a caneta do contato com a sua pele (vide figura 7). Ao retirar a caneta, a proteção de segurança irá se estender automaticamente de modo a cobrir a agulha.
- A janela de inspeção da caneta MYCLIC® deverá ter se tornado totalmente roxa, o que confirma que a dose foi injetada de modo correto. Caso a janela não tenha se tornado totalmente roxa, entre em contato com seu médico/farmacêutico para pedir assistência, uma vez que a caneta pode não ter aplicado a solução de ENBREL® por completo. Não tente utilizar a caneta novamente e não tente utilizar outra caneta sem antes consultar seu médico/farmacêutico.
- Caso observe uma pequena mancha de sangue no local da injeção, mantenha-o pressionado com uma bola de algodão ou com gaze por 10 segundos. Não esfregar o local de injeção.

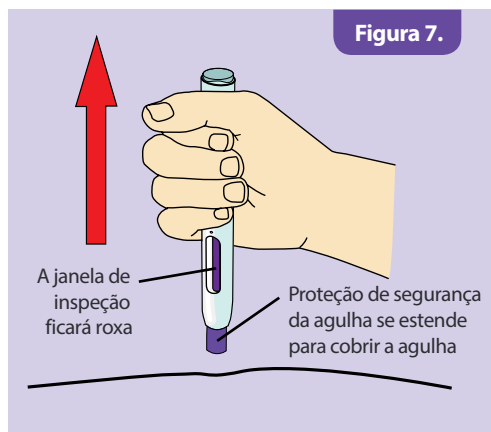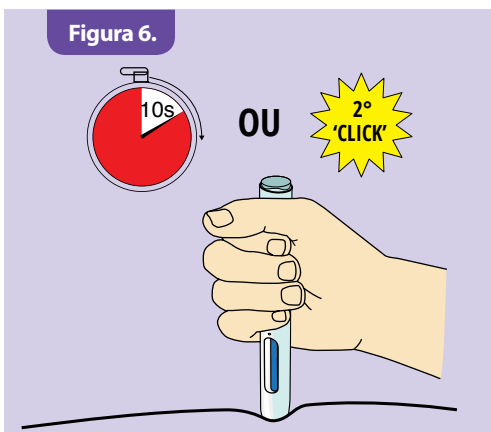

PASSO 4

Descarte a caneta MYCLIC® usada^{1,2}

O descarte deste tipo de material deve ser feito de maneira e em locais apropriados, caso você não tenha um coletor de descarte específico para materiais perfurocortantes, você deve utilizar um recipiente com tampa, de parede rígida e resistente à ruptura ou vazamento, como uma garrafa PET por exemplo.

Quando cheio, entregue em um posto de saúde, ou em farmácias, para ser incinerado ou aterrado de forma segura e correta. Evite riscos: não reutilize seringas e agulhas.

Viajando com Enbrel® (etanercepte)

- Lembre-se: ENBREL® deve ser armazenado entre 2 °C e 8 °C.¹
- Ao deslocar-se por via aérea, pergunte antecipadamente à companhia aérea ou às autoridades competentes se você pode transportar ENBREL® a bordo na sua bagagem de mão, e se pode ser conservado sob refrigeração durante o voo.³
- É recomendado que você porte a receita para ENBREL®, além de uma carta escrita pelo seu médico – caso tenha que explicar à alfândega ou à segurança do aeroporto porque precisa trazer consigo as canetas MYCLIC®. Não se esqueça de deixar cópias da receita e da carta em casa, no caso de perda dos originais.³

Caso você tenha qualquer dúvida, consulte seu médico, enfermeiro ou farmacêutico. Você também pode utilizar o canal 0800 do Programa Muito Bem-Vindo para buscar orientações através do telefone 0800 726 7272.



**CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O LINK DA BULA DE ENBREL®:**

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA MAIS FREQUENTE: NÃO UTILIZAR O PRODUTO EM ASSOCIAÇÃO A ANAKINRA E ABATACEPTE.
CONTRAINDICAÇÃO MAIS FREQUENTE: ENBREL® (ETANERCEPTE) É CONTRAINDICADO A PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AO ETANERCEPTE OU A QUALQUER COMPONENTE DA FÓRMULA DO PRODUTO E A PACIENTES COM INFECÇÃO LOCALIZADA OU GENERALIZADA, CRÔNICA OU ATIVA, OU EM RISCO DE DESENVOLVÊ-LA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

© Copyright 2021 Laboratórios Pfizer Ltda. Todos os direitos reservados.
Material destinado a prescritores e não prescritores, parceiros comerciais e público em geral.
Proibida a reprodução ou compartilhamento com terceiros.

PP-ENB-BRA-0565 - Novembro/2021

Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Alexandre Dumas, 1.860 – Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP

CEP 04717-904 - CNPJ 61.072.393/0001-33

Todos os direitos reservados. www.pfizer.com.br

Wyeth é uma empresa do Grupo Pfizer.

